

Medyczny materac pneumatyczny z pompą

Model: HF6003

Instrukcja użytkowania

Wydanie EJ 02.2024





Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku mogą znaleźć pliki w formacie PDF oraz inne informacje o naszych produktach na naszej stronie internetowej pod adresem:

<www.viteacare.com>.

👉 W razie potrzeby prosimy zwrócić się do specjalistycznego sprzedawcy.

Użytkownik z niepełnosprawnością narządu wzroku może również zwrócić się do osoby towarzyszącej z prośbą o przeczytanie instrukcji.

Spis treści

Zasada działania	4
Przewidziane zastosowanie	4
Przeciwwskazania	4
Wytyczne dotyczące użytkowania	4
Ogólne	4
Instalacja / użytkowanie	4
Charakterystyka wyrobu	5
Parametry techniczne materaca	5
Parametry techniczne sprężarki (pompy)	5
Środki bezpieczeństwa	5
Utylizacja	5
Czyszczenie / dezynfekcja	6
Konserwacja	7
Symbole	7
Dane kontaktowe	8

Zasada działania

- Zmienne ciśnienie w odpowiednim rytmie pozwala uniknąć długotrwałego ucisku naczyń, który może spowodować niedotlenienie tkanek.
- Zmienny nacisk dostosowuje materac do pacjenta i jego pozycji.

Przewidziane zastosowanie

Profilaktyka i wspomaganie leczenia odleżyn I i II stopnia.

Dzięki budowie opartej na podzieleniu materaca na komory powietrzne uzyskuje się równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłową wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci) oraz dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy. Wszystkie te czynniki są decydujące w profilaktyce i leczeniu odleżyn. Materace zmiennociśnieniowe nie usuwają wszystkich bezpośrednich przyczyn powstawania odleżyn, ale poprzez cykliczną zmianę punktów podparcia ograniczają czas ich oddziaływania na daną część ciała w takim stopniu, iż nie dochodzi do powstawania odleżyn ani ich rozwojowi.

Przeciwwskazania

W razie wystąpienia niepożądanych zmian skórnych należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub personelem medycznym.

Wytyczne dotyczące użytkowania

Tradycyjnie przyjętą metodą kontroli odleżyn jest obracanie klienta w regularnych odstępach czasu i regularne obserwowanie obszarów ryzyka.

Materac zmiennociśnieniowy jest przeznaczony do uzupełnienia tego leczenia, obserwacja klienta i obracanie w razie potrzeby powinny być nadal traktowane jako część leczenia.

Ogólne

- Dla pacjentów, którzy mogą spędzać w łóżku więcej niż 15 godzin dziennie.
- Dla pacjentów, u których ryzyko wystąpienia odleżyn jest średnie lub wysokie.

Instalacja / użytkowanie

1. Rozwiń materac.
2. Umieść go na łóżku.
3. Przymocuj go do łóżka za pomocą pasków mocujących.
4. Zawieś kompresor (pompę) na końcu łóżka (od strony stóp) za pomocą haków.
5. Podłącz przewody zasilające materaca do złącza sprężarki (pompy), dopasowując odpowiednie wyloty.
6. Podłącz kabel zasilania elektrycznego do sprężarki (pompy).
7. Poprowadź urządzenie wzdłuż łóżka do gniazda wtykowego materaca i podłącz je.
8. Naciśnij przełącznik, aby włączyć sprężarkę (pompę).
9. Przed ułożeniem pacjenta na materacu należy poczekać, aż materac zostanie całkowicie napompowany.
10. Wybierz ciśnienie odpowiadające morfologii pacjenta.

Charakterystyka wyrobu

Zawartość opakowania: instrukcja używania, materac, pompa.

Parametry techniczne materaca

Maksymalna waga użytkownika	130 kg
Wymiary materaca (długość x szerokość x wysokość)	przed pompowaniem: 2410x970 mm po napompowaniu: 1800x900x80 mm
Materiały	PVC 0,32 mm

Parametry techniczne sprężarki (pompy)

Czas cyklu	12 minut
Wydajność powietrza	5-7 l/min.
Zakres ciśnienia	30-110 mmHg
Ochrona przed porażeniem prądem	klasa II
Gwarancja	12 miesięcy

Środki bezpieczeństwa

- Należy zachować ostrożność podczas obsługi tego urządzenia elektrycznego.
- Nie wolno pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania elektrycznego, gdy nie jest używane.
- Nie wolno narażać urządzenia na nadmierną wilgotność.
- Nie wolno używać żrących środków czyszczących, takich jak odtłuszczacze przemysłowe lub rozpuszczalniki octowe.
- Nie wolno próbować przenosić urządzenia, gdy jest podłączone do zasilania elektrycznego.



OSTRZEŻENIE:
Modyfikowanie tego urządzenia jest zabronione.



OSTRZEŻENIE:
Nie należy modyfikować urządzenia bez autoryzacji producenta.



OSTRZEŻENIE:
Jeśli sprzęt zostanie zmodyfikowany, należy przeprowadzić odpowiednie kontrole i testy, aby zapewnić jego dalsze bezpieczne użytkowanie.

Utylizacja



SELEKTYWNA ZBIÓRKA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH.
Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych oraz baterii nie wolno

wyrzucać do odpadów komunalnych. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu należy oddać takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich można oddać swe wyroby lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu. Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wspierać prewencję potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogłyby być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Więcej informacji uzyskać można w urzędach gminnych lub miejscach zbiórki odpadów. W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy. Likwidacja w krajach poza Unię europejską: Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych urzędach lub od swojego sprzedawcy.



Urządzenie nie nadaje się do użytku w obecności łatwopalnych mieszanin środków znieczulających z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu.



Urządzenie nie wymaga kalibracji.



Operator nie może jednocześnie dotykać pompy i pacjenta.



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia użytkownik musi sprawdzić, czy działa ono bezpiecznie i czy jest w odpowiednim stanie technicznym.



Wtyczka działa jako urządzenie odłączające, należy umieścić w dostępnej pozycji podczas pracy.

Czyszczenie / dezynfekcja

Sprężarka (pompa):

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
- **NALEŻY UŻYWAĆ** szmatki nasączonej łagodnym roztworem detergentu.
- Należy dbać o przestrzeganie stężeń roztworów producenta.
- Należy uważać, aby nie przekroczyć zaleceń producenta przed użyciem roztworu czyszczącego.










Używać ściereczki nasączonej roztworem detergentu lub detergentu/środka dezynfekującego do powierzchni ze znakiem CE, stosując się do stężeń zalecanych przez producenta i przestrzegając czasów trwałości.

Konserwacja

Czynności konserwacyjne sprężarki (pompy) muszą być wykonywane wyłącznie przez technika autoryzowanego i przeszkolonego przez importera.

Częstotliwość	Przedmiot kontroli	Uwagi
Przed pierwszym użyciem	Kontrola stanu technicznego wszystkich elementów wyrobu.	Należy sprawdzić, czy żadne elementy nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych.
Raz w miesiącu	Czystość, stan ogólny.	W przypadku powstałych uszkodzeń mechanicznych należy bezzwłocznie skontaktować się z dystrybutorem.

Symbole

	Wyrób medyczny
	Data produkcji
	Producent (wytwórca)
	Dystrybutor
	Importer
	Upoważniony przedstawiciel w EU
	Conformité Européene (zgodność z wymogami UE)
	Numer katalogowy (do ponownego zamówienia)
	Numer seryjny

	Numer partii/serii
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny
	Postępuj zgodnie z instrukcją używania
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Możliwość zacięcia palców
	Część aplikacyjna typu B
	Urządzenie klasy II

Dane kontaktowe



Foshan Hongfeng Co., Ltd
 Address: No.4-2 Leqiang Road, Leping Sanshui, Foshan, 528100,
 Guangdong, China



MedNet EC-REP GmbH
 Adres: Borkstrasse 10 48163 Muenster, Niemcy
 EC-REP SRN: DE-AR-000000002



Importer
 mdh Sp. z o.o.
 Adres: Ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź, Polska
 tel. +48 42 674 83 84, fax. +48 42 636 52 21
 www.mdh.pl
 www.viteacare.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych uwarunkowanych postępowaniem technicznym.