

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Stojak na kroplówki z kółkami, 4 zaczepy

Kod produktu: TGR-R SK-4H



## 1. Wykonanie

Stojak na kroplówki wykonany jest z aluminium, posiada cztery zaczepy oraz plastikową podstawę z pięcioma kółkami i hamulcami. Dzięki prostej regulacji wysokości, posiada możliwość indywidualnego dostosowania do potrzeb użytkownika.


## 2. Zastosowanie

Stojak jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym podanie płynów infuzyjnych. Przeznaczony do stosowania w warunkach domowych i szpitalnych.

## 3. Montaż

**Krok 1.** Plastikowy łącznik (3) należy włożyć do otworu montażowego znajdującego się na środku podstawy (4).

**Krok 2.** Trzon stojaka (2) należy włożyć do plastikowego łącznika (3) umieszczonego wcześniej w podstawie (4).

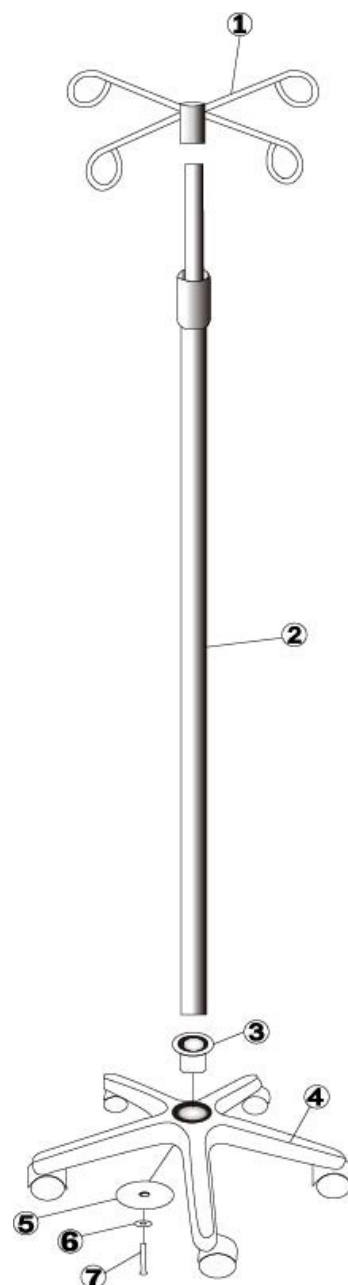

**Krok 3.** Od dołu podstawy (4) należy zamocować podkładki zabezpieczające (5,6) oraz wkręcić śrubę (7).

**Krok 4.** Uchwyt na kroplówki (1) należy przykręcić w górnej części trzonu (2).

#### 4. Specyfikacja techniczna

<b>Regulacja wysokości</b>	104 -211 cm
<b>Waga stojaka</b>	2,56 kg
<b>Maks. obciążenie jednego zaczepu</b>	2,5 kg
<b>Średnica podstawy</b>	56 cm
<b>Wysokość podstawy</b>	13 cm
<b>Koła</b>	5 kół o śr. 2''

#### 5. Uwagi i zalecenia

**Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.**

#### 6. Konserwacja

- Stojak należy czyścić używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła lub delikatnych detergentów posiadających atest PZH, po każdym użyciu wycierać do sucha.

- Nie należy używać do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Należy systematycznie sprawdzać:
  - dokręcenie śrub
  - stan sztyftów
  - stan rurek (pod kątem pęknięć)
  - stan kółek

## 7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

## 8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją



Producent dokonał oceny zgodności z  
wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów  
medycznych.

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych  
dystrybutorów. Dowiedz się więcej na [www.timago.com](http://www.timago.com)

**Dziękujemy za wybór Timago!**



Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021