

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wózek transportowy IDEAL
Nr kat. 700 002




Proszę nie używać tego sprzętu przed zapoznaniem się i zrozumieniem niniejszej instrukcji. Jeżeli nie możesz zrozumieć niniejszej instrukcji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lekarzem przed przystąpieniem do używania urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub uszczerbku na zdrowiu. Zawsze przed rozpoczęciem używania sprawdź urządzenie.

Wózek transportowy IDEAL służy do doraźnego transportu pacjenta. W wyposażeniu wygodna torba, do łatwego transportowania wózka po jego złożeniu. Z tyłu oparcia znajduje się mała kieszeń na podręczne rzeczy użytkownika. Konstrukcja aluminiowa.

OPIS OGÓLNY:

- A – koła przednie skrętne
- B – stały podnózek
- C – przednia rura ramy
- D – siedzisko
- E – miękkie, uchylne podłokietniki
- F – uchwyt
- G – hamulec
- H – oparcie
- I – regulowany pas bezpieczeństwa
- J – koła tylne z hamulcami

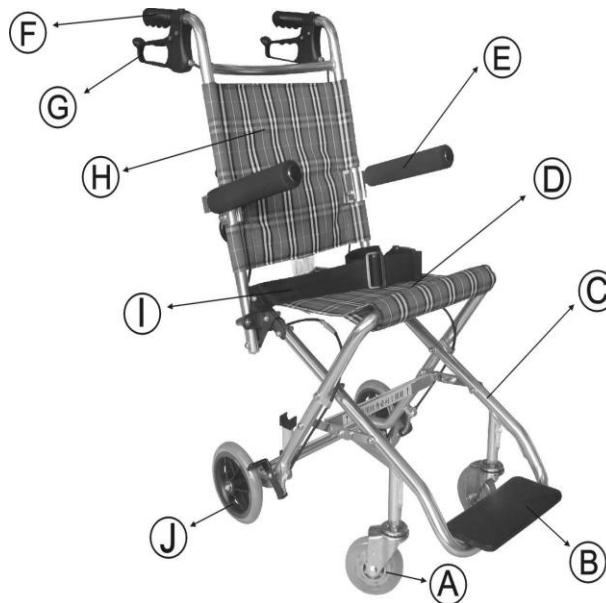

MONTAŻ WÓZKA:

Po rozpakowaniu wózka z torby, należy odpiąć czarna taśmę na zatrzask zabezpieczającą wózek przed samoczynnym rozkładaniem się. Następnie ustawić wózek na kołach, w tym celu należy podnieść oparcie w górę i pociągnąć delikatnie za przednią ramę siedziska. Pomiędzy konstrukcją krzyżakową pod siedziskiem, jest poprzeczka bezpieczeństwa, która należy zablokować podciągając ją w górę. Zabezpiecza ona wózek przed samoczynnym złożeniem się siedziska. Oparcie ma dwa zabezpieczenia – pierwsze, to dwa klipsy z tyłu siedziska, które „wskakują” w ramę oparcia. Drugie, to łączniki bezpieczeństwa, które w trakcie użytkowania muszą być zablokowane jak na rysunku 1. Po takim zmontowaniu wózek jest gotowy do użycia. Po złożeniu wózka, należy sprawdzić wszystkie zabezpieczenia i mocowania. Do wózka są dołączone niezbędne narzędzia. Jeżeli pojawiają się jakiegokolwiek wątpliwości podczas użytkowania podpórki, skontaktować się z punktem sprzedaży.



rys. 1 - łącznik bezpieczeństwa

W celu złożenia, należy wykonać wszystkie wyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności. (aby odblokować dwa przyciski przy siedzisku zabezpieczające oparcie, należy użyć wąskiej taśmy z tyłu siedziska – po delikatnym pociągnięciu jej zatrzaski odblokują oparcie)

Wyprodukowane przez **HERDEGEN, Francja**

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem:

ASTON sp. z o.o., ul. Powstania Wlkp 45, 88 – 320 Strzelno

☎ (052) 318 38 57 lub 318 95 05, fax (052) 318 37 01

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wózek transportowy IDEAL
Nr kat. 700 002



UWAGI:

1. Używać wózka transportowego IDEAL tylko na płaskim, twardym podłożu;
Nie używać na schodach! Nie podnosić wózka z osobą transportowaną!
2. Zachować ostrożność na mokrej lub śliskiej nawierzchni;
3. Wózek transportowy IDEAL nie mogą być narażony na długotrwałe działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych (np. bardzo silny mróz lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych).
4. Przechowywać w suchym miejscu, nie używać podczas opadów deszczu czy śniegu.
5. Nie wolno stawać na podnóżku.
6. Należy unikać gwałtownych ruchów podczas transportowania.
7. Nie należy transportować osoby siedzącej na wózku np. w karetce czy innym pojeździe.
8. Okresowo sprawdzać stan techniczny wózka. Nie używać wózka w przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń.
9. Wózek należy czyścić regularnie używając ogólnie dostępnych łagodnych środków posiadających atest PZH. Nie używać środków ściernych lub zawierających chlor.
10. Używać smarów silikonowych do konserwacji śrub oraz mechanizmów, aby zapobiec ewentualnej korozji

DANE TECHNICZNE:

wysokość od podłoża do uchwytów:	88 cm
całkowita głębokość:	86 cm
całkowita szerokość:	45 cm
szerokość między podłokietnikami:	37 cm
szerokość siedziska:	30 cm
głębokość siedziska	33 cm
wysokość oparcia:	39 cm
wysokość siedziska od podłoża:	43 cm
wymiary podnóżka:	21 cm x 10 cm
waga wózka:	7 kg
max obciążeni:	100 kg

Wyprodukowane przez **HERDEGEN, Francja**

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem:

ASTON sp. z o.o., ul. Powstania Wlkp 45, 88 – 320 Strzelno

☎ (052) 318 38 57 lub 318 95 05, fax (052) 318 37 01

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wyprodukowane przez **HERDEGEN, Francja**

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem:

ASTON sp. z o.o., ul. Powstania Wlkp 45, 88 – 320 Strzelno

☎ (052) 318 38 57 lub 318 95 05, fax (052) 318 37 01