

INSTRUKCJA OBSŁUGI



fotel obrotowy do wanny INOX

Nr kat. 540 285

Przeznaczenie: Fotel obrotowy do wanny służy osobom niepełnosprawnym oraz z obniżoną sprawnością ruchową, osobom w podeszłym wieku, jako pomoc podczas kąpieli. Proszę nie używać tego sprzętu przed zapoznaniem się i zrozumieniem niniejszej instrukcji. Jeżeli nie możesz zrozumieć niniejszej instrukcji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lekarzem przed przystąpieniem do używania urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub uszczerbku na zdrowiu. Zawsze przed rozpoczęciem używania sprawdź urządzenie.

Budowa: Fotel obrotowy składa się z jednolitego siedziska (fotela) z tworzywa sztucznego oraz konstrukcji ramowej z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Konstrukcja umożliwia obrót siedziska o 360° w celu maksymalnego ułatwienia dostępu do wanny użytkownikowi. Rury na powierzchni styku z wanną zabezpieczone są miękkim tworzywem – zapobiega to uszkodzeniu (porysowaniu) wanny podczas użytkowania. Podłokietniki są stałe, nie ma możliwości ich demontażu czy odchylenia.

Użytkowanie: Po rozpakowaniu towaru, należy umieścić siedzisko w podstawie oraz dokręcić je za pomocą czarnego pokręta. Wówczas element blokujący fotel powinien „wskoczyć” w jeden z czterech otworów blokujących. Umieścić fotel na wannie, opierając go na jej krawędziach. Dla zachowania stabilności, pokręcać stabilizatorami, aż oprą się o wewnętrzną ścianę wanny. Przed użyciem sprawdzić stabilność. Aby obrócić fotel, należy podnieść manetkę blokującą. Po ustawieniu wybranej pozycji zablokować manetkę w jednym z otworów. Należy zwrócić uwagę, aby podstawa fotela stabilnie opierała się na obu krawędziach wanny. Wymagana powierzchnia krawędzi wanny 7 cm.

Utrzymanie czystości: Fotel należy czyścić regularnie używając ogólnie dostępnych łagodnych środków posiadających atest PZH. Nie używać środków ściernych lub zawierających chlor.

Dane techniczne:

- max. szerokość wanny: 70 cm
- wymiary podstawy 50 cm x 73 cm
- szerokość między podłokietnikami 49,5 cm
- głębokość siedziska 34 cm
- szerokość siedziska 40 cm
- wysokość oparcia 34 cm
- dopuszczalna waga użytkownika: 100 kg
- waga fotela: 4,5 kg
- 4 pozycje blokowania obrotu fotela co 90°

Wyprodukowane przez HERDEGEN, Francja

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem:

ASTON sp. z o.o., ul. Powstania Wlkp 45, 88 – 320 Strzelno

☎ (052) 318 38 57 lub 318 95 05, fax (052) 318 37 01

INSTRUKCJA OBSŁUGI



fotel obrotowy do wanny INOX

Nr kat. 540 285

Przeznaczenie: Fotel obrotowy do wanny służy osobom niepełnosprawnym oraz z obniżoną sprawnością ruchową, osobom w podeszłym wieku, jako pomoc podczas kąpieli. Proszę nie używać tego sprzętu przed zapoznaniem się i zrozumieniem niniejszej instrukcji. Jeżeli nie możesz zrozumieć niniejszej instrukcji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lekarzem przed przystąpieniem do używania urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub uszczerbku na zdrowiu. Zawsze przed rozpoczęciem używania sprawdź urządzenie.

Budowa: Fotel obrotowy składa się z jednolitego siedziska (fotela) z tworzywa sztucznego oraz konstrukcji ramowej z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Konstrukcja umożliwia obrót siedziska o 360° w celu maksymalnego ułatwienia dostępu do wanny użytkownikowi. Rury na powierzchni styku z wanną zabezpieczone są miękkim tworzywem – zapobiega to uszkodzeniu (porysowaniu) wanny podczas użytkowania. Podłokietniki są stałe, nie ma możliwości ich demontażu czy odchylenia.

Użytkowanie: Po rozpakowaniu towaru, należy umieścić siedzisko w podstawie oraz dokręcić je za pomocą czarnego pokrętki. Wówczas element blokujący fotel powinien „wskoczyć” w jeden z czterech otworów blokujących. Umieścić fotel na wannie, opierając go na jej krawędziach. Dla zachowania stabilności, pokręcać stabilizatorami, aż oprą się o wewnętrzną ścianę wanny. Przed użyciem sprawdzić stabilność. Aby obrócić fotel, należy podnieść manetkę blokującą. Po ustawieniu wybranej pozycji zablokować manetkę w jednym z otworów. Należy zwrócić uwagę, aby podstawa fotela stabilnie opierała się na obu krawędziach wanny. Wymagana powierzchnia krawędzi wanny 7 cm.

Utrzymanie czystości: Fotel należy czyścić regularnie używając ogólnie dostępnych łagodnych środków posiadających atest PZH. Nie używać środków ściernych lub zawierających chlor.

Dane techniczne:

- max. szerokość wanny: 70 cm
- wymiary podstawy 50 cm x 73 cm
- szerokość między podłokietnikami 49,5 cm
- głębokość siedziska 34 cm
- szerokość siedziska 40 cm
- wysokość oparcia 34 cm
- dopuszczalna waga użytkownika: 100 kg
- waga fotela: 4,5 kg
- 4 pozycje blokowania obrotu fotela co 90°

Wyprodukowane przez HERDEGEN, Francja

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem:

ASTON sp. z o.o., ul. Powstania Wlkp 45, 88 – 320 Strzelno

☎ (052) 318 38 57 lub 318 95 05, fax (052) 318 37 01