



INSTRUKCJA OBSŁUGI - KRZESŁA I TABORETY PRYSZNICOWE

Šzanowni Państwo,
dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie, którym nas obdarzyliście.
Dotyczyliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie znacznym ułatwieniem podczas codziennych czynności toaletowych. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.

Przeznaczenie wyrobu:

Krzesła oraz taborety prysznicowe jako sprzęt pomocniczy przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których, ze względów zdrowotnych standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwiają i pomagają podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabine prysznicowej.

Dane użytkowe:

Maksymalny ciężar pacjenta zapewniający bezpieczne korzystanie z produktu – 110 kg

Uwagi i ostrzeżenia:

W celu uniknięcia wypadku prosimy o:

1. Sprawdzenie czy wszystkie rurki są proste, nie nadłamane (np. w transporcie), czy opakowaniu znajdują się wszystkie elementy składowe wyrobu.
2. Sprawdzenie czy wszystkie elementy z polietylenu nie posiadają uszkodzeń np. pęknięć
3. Sprawdzenie czy wszystkie nogi krzesła/taboretu ustawione są na tej samej wysokości. Dotyczy modeli: (AR-201, AR-201A, AR-202, AR-202, AR-205, AR-208, AR-209)
4. Sprawdzenie czy na wszystkich nogach znajdują się nakładki gumowe antypoślizgowe oraz czy wszystkie są prawidłowo założone.

W celu uniknięcia urazów:

1. Wszystkie elementy z polietylenu muszą być solidnie i trwale przymocowane (za pomocą dołączonych śrub) z nogami oraz oparciem (dot. modelu AR-203, AR-208)
2. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stanu technicznego, stabilności wyrobu przed użyciem (sprawdzenie wszystkich elementów mocujących, turek ramy wyrobu oraz nasadek gumowych)
3. Wszystkie nogi krzesła/taboretu prysznicowego muszą być ustawione na tej samej wysokości. Dotyczy modeli: (AR-201, AR-201A, AR-202, AR-203, AR-205, AR-208, AR-209)
4. Używać tylko na płaskim, twardym podłożu uniemożliwiającym przesunięcie się krzesła podczas siedzenia
5. Zachować szczególną ostrożność na mokrej lub śliskiej powierzchni pomimo antypoślizgowych nasadek
6. Zabrania się gwałtownego siedzenia na krzesło / taboret (m.in. wskakiwania)
7. Zabrania się przenoszenia krzesła / taboretu wraz z użytkownikami
8. Zabrania się stawiania obuwia na siedzisku oraz którymkolwiek elemencie wyrobu.
9. Nie wolno przeciążać wyrobu, przekraczać maksymalnego obciążenia określonego przez Wytwórcę.
10. Zaleca się aby przed użytkowaniem wyrobu śliskie powierzchnie wyłożone były matami antypoślizgowymi (np. kabina prysznicowa)

Sposób konserwacji:

Każdorazowo po dokonaniu czynności toaletowych wyrób należy dokładnie wyplukać czystą wodą (nie pozostawiać na wyrobie mydła, szamponu, żelu do kąpieli itp.) a następnie dokładnie osuszyć delikatną szmatką. Zabrania się stosowania do czyszczenia mocnych detergentów, benzyny oraz rozpuszczalników. Przechowywanie w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności np. (piwnicy) w połączeniu z brakiem dokładnej konserwacji wyrobu (higieny, suszenia) będą przyczyną utraty parametrów użytkowych i estetycznych krzesła/taboretu a tym samym utraty gwarancji. Nie wolno używać środków ściernych! Elementy gumowe antypoślizgowe, (nasadki na nogi) (5) są elementem zużywalnym i muszą być regularnie wymieniane na nowe.


Rozwiązywanie problemów:

W przypadku wystąpienia problemów prosimy przeanalizować niniejszy rozdział. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. Samodzielne naprawianie wyrobu jest **ZABRONIONE!!!** Grozi to wypadkiem.

I. Krzesło / taboret prysznicowy nie jest stabilny/ę.

- a. Czy wszystkie nogi krzesła/taboretu są na tej samej wysokości? Jeśli nie, należy je prawidłowo ustawić.
- b. Czy wszystkie nogi posiadają nasadki gumowe (5)? Jeśli nie, należy je założyć.
- c. Czy wszystkie nasadki gumowe (5) są prawidłowo założone? Jeśli nie, należy dobrze je wcisnąć.
- d. Czy wyrób ma stabilnie przykręcone elementy z polietylenu do ramy (1) (dołączonymi śrubami)? Jeśli nie, wszystkie śruby należy ponownie mocno dokręcić. Wszystkie elementy wyrobów należy skrócić/złóżyć w taki sposób aby po zakończeniu czynności stanowiły dokładne odwzorowanie zdjęcia wyrobu ze strony 1 (dot. wszystkich modeli)
- e. Pomimo solidnego dokręcenia wszystkich śrub montażowych wyrób nadal nie jest stabilny? Jeśli nie, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. **NIE WOLNO UŻYWAĆ KRZESŁA/TABORETU PRYSZNICOWEGO!!!**

ELEMENTY SKŁADOWE / UŻYTKOWE

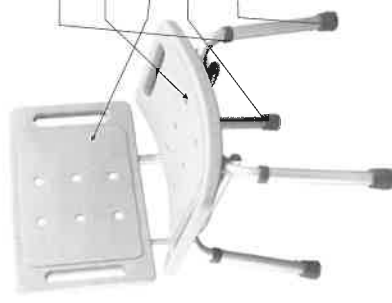

1. Rama aluminiowa
(Rama stalowa: dot. model AR-204)
2. Siedzisko polietylenowe
(kształt zależny od modelu)
3. Oparcie polietylenowe
(dotyczy modelu AR-203, AR-208)
4. Regulacja wysokości nóg
(dotyczy modelu AR-201, AR-201A, AR-202, AR-205, AR-208, AR-209)
5. Nasadki gumowe antypoślizgowe

Przygotowanie do użycia

1. Wyjąć krzesło/taboret prysznicowy z opakowania kartonowego lub foliowego. Wyrób wyjęty z opakowania wymaga montażu przed pierwszym użyciem.
2. W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan techniczny wyrobu zgodnie z pkt. **Uwagi i ostrzeżenia**.
3. Położyć na podłogę lub twardej powierzchni siedzisko (2) tak aby widoczna była część spodnia. Chwyć elementy ramy aluminiowej (1) (stalowej dot. modelu AR-204) i ustaw je nasadkami gumowymi ku górze (5), w taki sposób aby otwory w elementach ramy i siedziska pokrywały się wzajemnie. Za pomocą wkręta (śrubokręta) wkręć wszystkie dołączone śruby w istniejące otwory, palcami - jeśli zastosowano śruby z plastikowymi modyfikacjami. Dot. modelu AR-203, AR-208: po zmontowaniu siedziska i ramy aluminiowej (nóg) należy przykręcić oparcie(3). Postępować należy jak przy montażu siedziska i ramy aluminiowej.

UWAGA! Wszystkie śruby muszą być mocno dokręcone co gwarantuje bezpieczne użytkowanie wyrobu.

4. Należy dopasować wysokość nóg krzesła/taboretu prysznicowego (dot. modelu: AR-201, AR-201A, AR-202, AR-203, AR-205, AR-208, AR-209) do wzrostu użytkownika, w tym celu należy wcisnąć główkę zatrzasku (4) znajdującego się w nodze, co spowoduje zwolnienie blokady. Ustawić poprzez rozsuwanie lub zsuwanie rurki wymaganą wysokość. Główna zatrzaska musi wskoczyć w otwór na żądaną wysokość. Czynność powtórzyć dla wszystkich nóg. Główna zatrzaska we wszystkich nogach musi znajdować się na tej samej wysokości.

Eventualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.

Zakończenie użytkowania:

1. Złóżyć taboret prysznicowy dot. modelu AR-204, AR-205

Czyszczenie i przechowywanie:

1. Postaw krzesło/taboret prysznicowy/ę w miejscu gdzie nie będzie narażony/ę na uszkodzenia mechaniczne.
2. W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

Dane Techniczne:

PARAMETR:	AR-201	AR-201A	AR-202	AR-203	AR-204	AR-205	AR-208	AR-209
Rama:	alumirowa	alumirowa	alumirowa	alumirowa	stalowa	alumirowa	alumirowa	alumirowa
Kolor ramy:	srebrny	srebrny / szary	srebrny	srebrny	biały	srebrny	srebrny	srebrny
Typ/model	stały	stały	stały	stały	składany	składany	stały	stały
Szerokość siedziska:	33 cm okrągłe	33 cm okrągłe	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	48 cm	41 cm
Głębokość siedziska:	33 cm okrągłe	33 cm okrągłe	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	33 cm	48 cm
Regulacja wysokości	38-56 cm	37-52 cm	36-47cm	36-47 cm	52 cm	47-50,5 cm	36-53 cm	35-45 cm
Waga produktu:	1,5 kg	1,9 kg	1,8 kg	3,0 kg	3,2 kg	2,4 kg	2,7 kg	2,1 kg
Maksymalne obciążenie:	110 kg	110 kg	110 kg	110 kg	110 kg	110 kg	110 kg	110 kg

KARTA GWARANCYJNA
Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu

Data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedawcy
Nr faktury zakupu	
Nr kat. Produktu / Nr partii	

1. Firma ARMEDICAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75, udziela niniejszym 12-miesięcznej gwarancji na produkt. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezwzględnie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres wytwórcy.
5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji tj: zarysowań, zadrapań elementów z polistyrenu i gumowych (tj. ścieranie się nasadek gumowych (5)).
6. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania krzesła/taboretu przysznycowego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez wytwórcę.
7. Gwarancja nie obejmuje wad wyrikkłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przyrówdek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
8. Gwarancją jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.
9. Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta.

ARMedical[®]
HomeCare Line

INSTRUKCJA OBSŁUGI
KARTA GWARANCYJNA
KRZESŁA I TABORETY PRYSZNICOWE



AR-203

AR-208

AR-202

AR-201A



AR-205

AR-201

AR-204

AR-209

- | | | | |
|---------|-----------------------------------------|--------|------------------------------------|
| AR-202 | Krzesło przysznycowe bez oparcia | AR-201 | Taboret przysznycowy - okrągły |
| AR-203 | Krzesło przysznycowe z oparciem | AR-204 | Taboret przysznycowy - składany |
| AR-208 | Krzesło przysznycowe z wycięciem U | AR-205 | Taboret przysznycowy - składany |
| AR-201A | Taboret przysznycowy okrągły - obrotowy | AR-209 | Taboret przysznycowy z wycięciem U |

ARMEDICAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel/fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

